

# VARODEM®

*FARROWWRAP™*

Gedistribueerd in Nederland door:

**Varodem S.A.**  
Rue d'Arlon 45  
B-6747 Saint-Léger  
België

**Servicekantoor Nederland**  
Postbus 4717  
6085 ZG Horn  
Nederland

+31-(0)475-589302  
info@farrowwrap.nl


[www.farrowwrap.nl](http://www.farrowwrap.nl)  
[www.varodem.nl](http://www.varodem.nl)

FarrowWrap is een handelsmerk van Farrow Medical Innovations Inc  
2009 Farrow Medical Innovations Inc. TX77803 USA



# VARODEM®

*FARROWWRAP™*

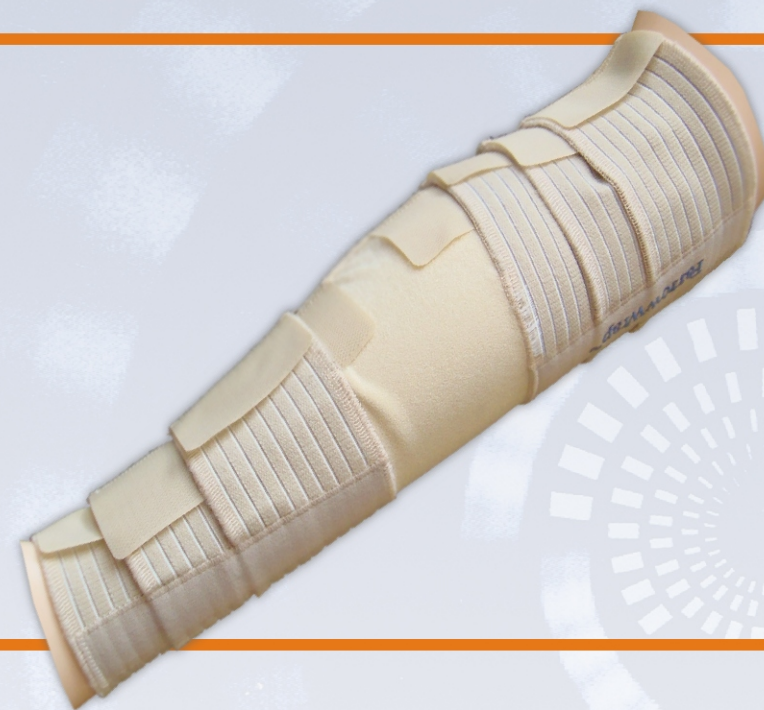

**FarrowWrap™ Classic**  
**Armverband**

Patent Pending

Maatwerk

**Let op:** eigenhandige veranderingen/modificaties aan het product leiden tot het vervallen van deze garantiebepaling.

Er geldt een reparatie/vervangingsgarantie van 15 dagen voor het product.

#### GARANTIE

- Gebruik een fijnwasmiddel
- Voorzichtig met scherpe vingernagels
- Vervang de FarrowWrap™ na 3 maanden, indien nodig eerder.
- Bewaar op een droge plaats.

Machinewas 30°		Niet stomen	
Niet bleken		Niet strijken	
Wasdroger koud			

#### VERZORGING

Om een instructievideo te bekijken, bezoek [www.farrowwrap.nl](http://www.farrowwrap.nl).



- Open wonden dienen afgedekt te worden voor het aanbrengen van het voetverband.
- Gebruik een liner (onderkous). Wij bevelen altijd het gebruik van een liner (onderkous) onder uw FarrowWrap™ aan.
- Pak het armverband uit en leg het op de tafel onder uw arm. Bevestig allereerst zo strak mogelijk het elleboogdeel, d.m.v. de twee straps met klittenband.
- Sluit hierna één voor één, zo strak mogelijk, de straps van het onderarmdeel.
- Doe dit hierna ook met het bovenarmdeel. Zorg voor voldoende druk.
- Vouw tot slot de uiteinden van de liner (onderkous) over de uiteinden van het FarrowWrap™ armverband.



#### AANTREKINSTRUCTIE

#### TOEPASSING

Het FarrowWrap™ Classic armverband is een korte-rek verband bedoeld voor de arm.

Het armverband is ontworpen om in combinatie gebruikt te worden met andere Farrow producten, zoals bijvoorbeeld de FarrowWrap™ liner (onderkous).

Het FarrowWrap™ Classic armverband ondersteunt de behandeling van aan- doeningen die zwelling van de arm veroorzaken, zoals veneuze insufficiëntie, lymfoedeem of postoperatieve complicaties.

Het product wordt vervaardigd met nylon en lycra; er wordt géén latex gebruikt. U vindt meer productinformatie op de website.

#### INDICATIES

Gemiddelde tot ernstige zwelling van de arm, veroorzaakt door veneuze, lymfatische en andere aandoeningen.

#### VOORZORGEN

Raadpleeg professioneel medisch advies, als u één van de onderstaande aan- doeningen heeft of recent heeft ontwikkeld:

- Huidaandoeningen c.q. natte eczeem
- Milde arteriële aandoeningen
- Contactallergie of allergieverschijnselen t.g.v. nylon of lycra
- Gecontroleerd CHF (congestief hartfalen)

#### CONTRA-INDICATIES

FarrowWrap™ is gecontra-indiceerd (mag **NIET** ingezet worden) als u lijdt aan een van de volgende aandoeningen:

- Matige tot ernstige arteriële aandoeningen, met name waarbij sprake is van (recent) verminderde gevoeligheid van voeten en/of tenen
- Onbehandelde vaatinfectie
- Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief hartfalen (CHF)