

VARODEM®

FARROWWRAP™

Gedistribueerd in Nederland door:

Varodem S.A.
Rue d'Arlon 45
B-6747 Saint-Léger
België

Servicekantoor Nederland
Postbus 4717
6085 ZG Horn
Nederland

+31-(0)475-589302
info@farrowwrap.nl

www.farrowwrap.nl
www.varodem.nl

FarrowWrap is een handelsmerk van Farrow Medical Innovations Inc
2009 Farrow Medical Innovations Inc. TX77803 USA



VARODEM®

FARROWWRAP™



FarrowWrap™ LITE
Armverband

Patent Pending

Arm

Links

Rechts

TOEPASSING

Het FarrowWrap™ LITE armverband is een korte-rek verband bedoeld voor de arm. Het armverband is ontworpen om in combinatie gebruikt te worden met andere Farrow producten, zoals bijvoorbeeld de meegeleverde liner (onderkous) of het FarrowWrap™ handverband.

Het FarrowWrap™ LITE armverband ondersteunt de behandeling van aan-
doeningen die zwelling van de arm veroorzaken, zoals veneuze insufficiëntie,
lymfoedeem of postoperatieve complicaties.

INDICATIES

Gemiddelde tot ernstige zwelling van de arm, veroorzaakt door veneuze,
lymfatische en andere aandoeningen.

VOORZORGEN

Raadpleeg professioneel medisch advies, als u één van de onderstaande aan-
doeningen heeft of recent heeft ontwikkeld:
• Huidaandoeningen c.q. natte eczeem
• Contactallergie of allergieverschijnselen t.g.v. nylon of lycra
• Verminderd gevoel in arm, hand of vingers (perifere neuropathie)
• Gecontroleerd CHF (congestief hartfalen)


CONTRA-INDICATIES

FarrowWrap™ is gecontraïndiceerd bij een van de volgende aandoeningen:
• Matige tot ernstige arteriële aandoeningen, met name waarbij sprake is van
(recent) verminderde gevoeligheid van arm, handen of vingers
• Onbehandelde vaatinfectie
• Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief hartfalen (CHF)
• Onbehandelde of gevorderde ontstekingen die betrekking hebben op de
arm

• Zwelling van de arm met een onbekende oorzaak

AANTREKINSTRUCTIE

Gebruik een onderkous onder het armverband. Bevestig aan de ene
kant de stukken klittenband op de verschildende flappen van het arm-
verband. Laat ongeveer de helft van het stuk klittenband uitsteken.
Doe hetzelfde met resterende 3 stukken aan de andere zijde. Plaats
deze stukken ter hoogte van de oksel, de pols en net boven de
ellebooghoogte.

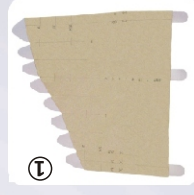

Strek nu de arm, met de handpalm naar boven (gesupineerd) en
bevestig het armverband aan de **onderkous** m.b.v. de drie stukken
klittenband. Plaats een stuk aan de buitenzijde van de bovenarm, een
stuk net boven de elleboog (buitenzijde) en een stuk ter hoogte van de
pols, dicht tegen de duim. Het armverband dient nu gedrapeerd te zijn
aan de buitenzijde van de arm.

Draai nu uw arm zo rustig mogelijk om, zodat de handpalm naar
beneden wijst. Het armverband hangt nu aan de bovenzijde van uw arm
vast aan de onderkous, terwijl de flap met de diverse stukken klitten-
band schuin naar onderen hangt. Deze stukken klittenband gaan we in
de volgende stap één voor één bevestigen.

Pak de flap het dichtst bij de pols en trek deze onder de arm door en
daarna loodrecht terug eroverheen. Maak de klittenbanden vast ervoor
zorgend dat de inkepingen van de flappen volledig over het materiaal
heen sluiten. De inkepingen mogen niet meer dan 1 cm. overlappen.
Eenmaal aangebracht kunnen de afzonderlijke flappen relatief een-
voudig (verder) aangepast worden. Een spiegel is hierbij makkelijk.

Als Het FarrowWrap™ armverband goed is aangebracht, is er weinig kans
op additionele oedeemvorming. Mocht het oedeem toch toenemen,
neem dan contact op met uw behandelaar om verder beleid af te
stemmen. Na overleg met uw behandelaar is het eventueel mogelijk om
de druk te verhogen, middels het strakker aanbrengen van de flappen.

Om een instructievideo te bekijken, bezoek www.farrowwrap.nl.

VERZORGING

Machinewas 30°



• Gebruik een fijnwasmiddel

Niet bleken



• Voorzichtig met scherpe vingernagels

Liggend laten drogen



• Vervang de FarrowWrap™ na 3 maanden,

Niet strijken



indien nodig eerder.

Niet stomen



• Bewaar op een droge plaats.

GARANTIE

Er geldt een garantietermijn van twee weken op het product.
Let op: eigenhandige veranderingen/modificaties aan het product
vervallen van deze garantiebeoordeling.

