

VARODEM®

FARROWWRAP™

Gedistribueerd in Nederland door:

Varodem S.A.
Rue d'Arlon 45
B-6747 Saint-Léger
België

Servicekantoor Nederland
Postbus 4717
6085 ZG Horn
Nederland

+31-(0)475-589302
info@farrowwrap.nl

www.farrowwrap.nl
www.varodem.nl

FarrowWrap is een handelsmerk van Farrow Medical Innovations Inc
2009 Farrow Medical Innovations Inc. TX77803 USA



VARODEM®

FARROWWRAP™



FarrowWrap™ Classic
Voetverband

Patent Pending

Maat XS S M L XL
Lengte Kort Nor. Lang Maatwerk
Lot #:

Let op: eigenhandige veranderingen/modificaties aan het product leiden tot het vervallen van deze garantie/bepaling.
Er geldt een reparatie/vervangingsgarantie van 15 dagen voor het product.

GARANTIE

- Gebruik een fijnwasmiddel
- Voorzichtig met scherpe vingernagels
- Vervang de FarrowWrap™ na 3 maanden, indien nodig eerder.
- Bewaar op een droge plaats.

VERZORGING

Machinewas 30°



Niet bleken



Liggend laten drogen



Niet strijken



Niet stomen



AANTREKINSTRUCTIE

- Open wonden dienen afgedekt te worden voor het aanbrengen van het voetverband.
- Gebruik een liner (onderkous). Wij bevelen altijd het gebruik van een liner (onderkous) onder uw FarrowWrap™ aan.
- Pak het voetverband uit en leg het op de grond onder uw voet. Plaats uw voet met de hak tegen de hiel van het voetverband, met de voorkant van het voetstuk geopend.
- Sluit, zo strak mogelijk, de bovenzijde aan de voorvoet.
- Pak hierna één van de enkelbanden, trek diagonaal over de wreef en bevestig deze zo strak mogelijk aan de bovenzijde m.b.v. de klttenband.
- Herhaal deze stappen met de enkelband aan de andere zijde.



Om een instructievideo te bekijken, bezoek www.farrowwrap.nl.

TOEPASSING

Het FarrowWrap™ Classic voetverband is een korte-rek verband bedoeld voor de voet.

Het voetverband is ontworpen om in combinatie gebruikt te worden met andere Farrow producten, zoals bijvoorbeeld het FarrowWrap™ onderbeenverband.

Het FarrowWrap™ Classic voetverband ondersteunt de behandeling van aan- doeningen die zwelling van de voet veroorzaken, zoals veneuze insufficiëntie, lymfoedeem of postoperatieve complicaties.

Het product wordt vervaardigd met nylon en lycra; er wordt géén latex gebruikt. U vindt meer productinformatie op de website.

INDICATIES

Gemiddelde tot ernstige zwelling van de voet, veroorzaakt door veneuze, lymfatische en andere aandoeningen.

VOORZORGEN

Raadpleeg professioneel medisch advies, als u één van de onderstaande aan- doeningen heeft of recent heeft ontwikkeld:

- Huidaandoeningen c.q. natte eczeem
- Milde arteriële aandoeningen
- Contactallergie of allergievervalsing t.g.v. nylon of lycra
- Verminderd gevoel in voet of tenen (perifere neuropathie)
- Gecontroleerd CHF (congestief hartfalen)
- Pijnlijke Hallux Valgus

CONTRA-INDICATIES

FarrowWrap™ is gecontra-indiceerd (mag **NIET** ingezet worden) als u lijdt aan een van de volgende aandoeningen:

- Matige tot ernstige arteriële aandoeningen, met name waarbij sprake is van (recent) verminderde gevoeligheid van voeten en/of tenen
- Onbehandelde vaatinfectie
- Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief hartfalen (CHF)
- Onbehandelde of gevorderde huidaandoeningen (cellulitis) betrekking hebbend op benen of voeten
- Zwelling van de voet met een onbekende oorzaak