

VARODEM®

FARROWWRAP™

Gedistribueerd in Nederland door:

Varodem S.A.
Rue d'Arlon 45
B-6747 Saint-Léger
België

Servicekantoor Nederland
Postbus 4717
6085 ZG Horn
Nederland

+31-(0)475-589302
info@farrowwrap.nl

www.farrowwrap.nl
www.varodem.nl

FarrowWrap is een handelsmerk van Farrow Medical Innovations Inc
2009 Farrow Medical Innovations Inc. TX77803 USA



VARODEM®

FARROWWRAP™



FarrowWrap™ LITE
Voetverband

Patent Pending

Maat	<input type="checkbox"/> XS	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XL
Lengte	<input type="checkbox"/> Kort	<input type="checkbox"/> Nor.	<input type="checkbox"/> Lang	<input type="checkbox"/> Maatwerk	
Kleur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Huid		Lot #:	

TOEPASSING

Het FarrowWrap™ LITE voetverband is een korte-rek verband bedoeld voor

de voet.

Het voetverband is ontworpen om in combinatie gebruikt te worden met andere Farrow producten, zoals bijvoorbeeld het FarrowWrap™ onderbeenverband.

Het FarrowWrap™ LITE voetverband ondersteunt de behandeling van aan-
doeningen die zwelling van de voet veroorzaken, zoals veneuze insufficiëntie,
lymfoedeem of postoperatieve complicaties.

Het product wordt vervaardigd met nylon en lycra; er wordt géén latex gebruikt.
U vindt meer productinformatie op de website.

INDICATIES

Milde tot gemiddelde zwelling van de voet, veroorzaakt door veneuze,
lymfatische en andere aandoeningen.

VOORZORGEN

Raadpleeg professioneel medisch advies, als u één van de onderstaande aan-
doeningen heeft of recent heeft ontwikkeld:

- Huidaandoeningen c.q. natte eczeem
- Milde arteriële aandoeningen
- Contactallergie of allergievervalsing t.g.v. nylon of lycra
- Verminderd gevoel in voet of tenen (perifere neuropathie)
- Gecontroleerd CHF (congestief hartfalen)
- Pijnlijke Hallux Valgus

CONTRA-INDICATIES

- FarrowWrap™ is gecontra-indiceerd (mag **NIE**t ingezet worden) als u lijdt aan een van de volgende aandoeningen:
- Matige tot ernstige arteriële aandoeningen, met name waarbij sprake is van (recent) verminderde gevoeligheid van voeten en/of tenen
 - Onbehandelde vaatinfectie
 - Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief hartfalen (CHF)
 - Onbehandelde of gevorderde huidaandoeningen (cellulitis) betrekking hebbend op benen of voeten
 - Zwelling van de voet met een onbekende oorzaak

AANTREKINSTRUCTIE

- Open wonden dienen afgedekt te worden voor het aanbrengen van het voetverband.
- Gebruik een liner (onderkous). Wij bevelen altijd het gebruik van een liner (onderkous) onder uw FarrowWrap™ aan.

- Pak het voetverband uit en leg het op de grond onder uw voet.
- Plaats uw voet met de hak tegen de hiel van het voetverband, met de voorkant van het voetstuk geopend.

- Sluit, zo strak mogelijk, de bovenzijde aan de voorvoet.
- Pak hierna één van de enkelbanden, trek diagonaal over de wreef en bevestig deze zo strak mogelijk aan de bovenzijde m.b.v. de klitteband.

- Herhaal deze stappen met de enkelband aan de andere zijde.

Om een instructievideo te bekijken, bezoek www.farrowwrap.nl.



VERZORGING

Machinewas 30°



Niet bleken



Wasdroger koud



Niet strijken



Niet stomen



GARANTIE

Er geldt een reparatie/vervangingsgarantie van 15 dagen voor het product.

Let op: eigenhandige veranderingen/modificaties aan het product leiden tot het vervallen van deze garantiebepaling.

- Gebruik een fijnwasmiddel
- Voorzichtig met scherpe vingernagels
- Vervang de FarrowWrap™ na 3 maanden, indien nodig eerder.
- Bewaar op een droge plaats.