

# VARODEM®

FARROWWRAP™

Gedistribueerd in Nederland door:

**Varodem S.A.**  
Rue d'Arlon 45  
B-6747 Saint-Léger  
België

**Servicekantoor Nederland**  
Postbus 4717  
6085 ZG Horn  
Nederland

+31-(0)475-589302  
info@farrowwrap.nl


[www.farrowwrap.nl](http://www.farrowwrap.nl)  
[www.varodem.nl](http://www.varodem.nl)

FarrowWrap is een handelsmerk van Farrow Medical Innovations Inc  
2009 Farrow Medical Innovations Inc. TX77803 USA



# VARODEM®

FARROWWRAP™

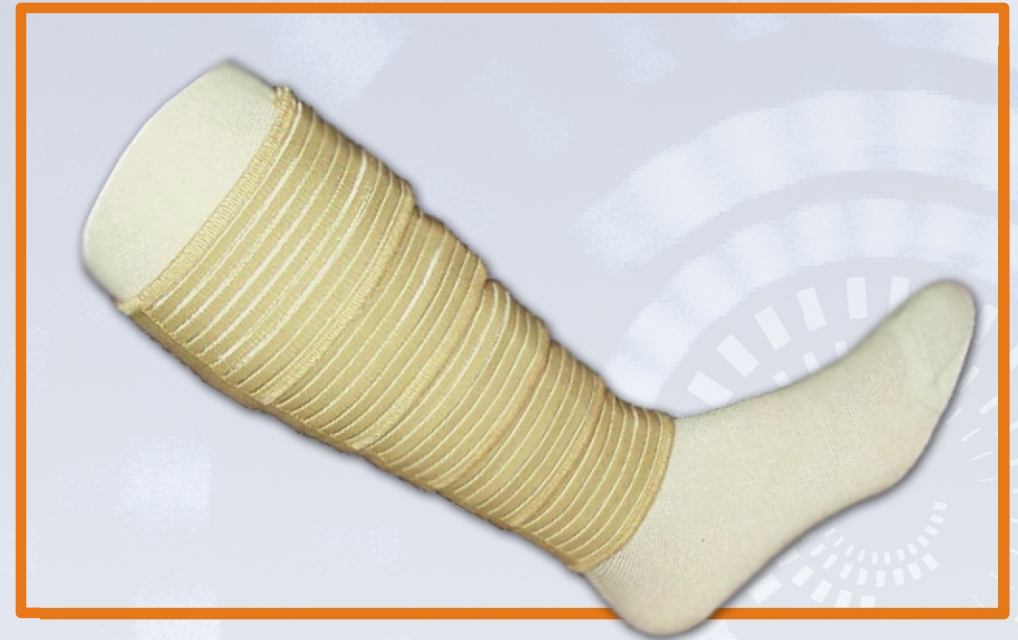

**FarrowWrap™ Classic**  
**Onderbeenverband**

Patent Pending

Maat  XS  S  M  L  XL  
Lengte  Kort  Nor.  Lang  Maatwerk  
Lot #:

**Let op:** eigenhandige veranderingen/modificaties aan het product leiden tot het vervallen van deze garantie/bepaling.  
Er geldt een reparatie/vervangingsgarantie van 15 dagen voor het product.

#### GARANTIE

- Gebruik een fijnwasmiddel
- Voorzichtig met scherpe vingernagels
- Vervang de FarrowWrap™ na 3 maanden, indien nodig eerder.
- Bewaar op een droge plaats.

#### VERZORGING

Machinewas 30°



Niet bleken



Liggend laten drogen



Niet strijken



Niet stomen



#### AANTREKINSTRUCTIE

- Open wonden dienen afgedekt te worden voor het aanbrengen van het onderbeenverband.
- Gebruik een liner (onderkous). Wij bevelen altijd het gebruik van een liner (onderkous) onder uw FarrowWrap™ aan.
- Pak het onderbeenverband uit en leg het op bed of op een stoel, met het label aan de bovenzijde naar u toe gericht.
- Pak de band welke het dichtst bij het smalste deel van uw enkel zit, met één hand aan elke zijde van de enkel.
- Wind de band zo strak mogelijk om het laagste deel van uw been, ruim boven de enkelknobbel.
- Bevestig de overgebleven banden op dezelfde manier.
- Trek de liner terug over het bovenste deel van het onderbeenverband.



Om een instructievideo te bekijken, bezoek [www.farrowwrap.nl](http://www.farrowwrap.nl).

#### TOEPASSING

Het FarrowWrap™ Classic onderbeenverband is een korte-rek verband bedoeld voor het been.

Het onderbeenverband is ontworpen om in combinatie gebruikt te worden met andere Farrow producten, zoals bijvoorbeeld de megeleverte liner (onderkous) of het FarrowWrap™ voet- of bovenbeenverband.

Het FarrowWrap™ Classic onderbeenverband ondersteunt de behandeling van aan- doeningen die zwelling van het been veroorzaken, zoals veneuze insufficiëntie, lymfoedeem of postoperatieve complicaties.

Het product wordt vervaardigd met nylon en lycra; er wordt geen latex gebruikt. U vindt meer productinformatie op de website.

#### INDICATIES

Gemiddelde tot ernstige zwelling van de voet, veroorzaakt door veneuze, lymfatische en andere aandoeningen.

#### VOORZORGEN

Raadpleeg professioneel medisch advies, als u één van de onderstaande aan- doeningen heeft of recent heeft ontwikkeld:

- Huidaandoeningen c.q. natte eczeem
- Milde arteriële aandoeningen
- Contactallergie of allergievervalsing t.g.v. nylon of lycra
- Verminderd gevoel in voet of tenen (perifere neuropathie)
- Gecontroleerd CHF (congestief hartfalen)
- Kuitomtrek > 23 cm.

#### CONTRA-INDICATIES

FarrowWrap™ is gecontra-indiceerd (mag **NIET** ingezet worden) als u lijdt aan een van de volgende arteriële aandoeningen, met name waarbij sprake is van (recent) verminderde gevoeligheid van voeten en/of tenen

- Onbehandelde vaatinfectie
- Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief hartfalen (CHF)
- Onbehandelde of gevorderde ontstekingen die betrekking hebben op de benen of voeten
- Zwelling van het been met een onbekende oorzaak