

# VARODEM®

## FARROWWRAP™

Gedistribueerd in Nederland door:

**Varodem S.A.**  
Rue d'Arlon 45  
B-6747 Saint-Léger  
België

**Servicekantoor Nederland**  
Postbus 4717  
6085 ZG Horn  
Nederland

+31-(0)475-589302  
info@farrowwrap.nl


[www.farrowwrap.nl](http://www.farrowwrap.nl)  
[www.varodem.nl](http://www.varodem.nl)

FarrowWrap is een handelsmerk van Farrow Medical Innovations Inc  
2009 Farrow Medical Innovations Inc. TX77803 USA



# VARODEM®

## FARROWWRAP™

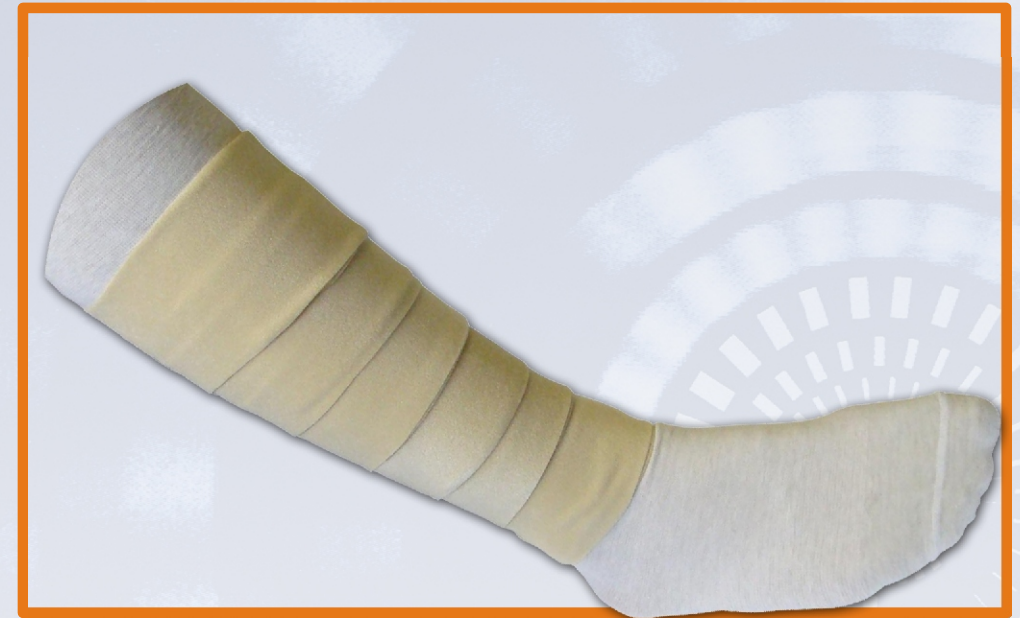

**FarrowWrap™ LITE**  
**Onderbeenverband**

Patent Pending

Maat	<input type="checkbox"/> XS	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XL
Lengte	<input type="checkbox"/> Kort	<input type="checkbox"/> Nor.	<input type="checkbox"/> Lang	<input type="checkbox"/> Maatwerk	
Kleur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Huid		Lot #:	

## TOEPASSING

Het FarrowWrap™ LITE onderbeenverband is een korte-rek verband bedoeld voor het been.

Het onderbeenverband is ontworpen om in combinatie gebruikt te worden met andere Farrow producten, zoals bijvoorbeeld de megeleverte liner (onderkous) of het FarrowWrap™ voet- of bovenbeenverband.

Het FarrowWrap™ LITE onderbeenverband ondersteunt de behandeling van aan-  
doeningen die zwelling van het been veroorzaken, zoals veneuze insufficiëntie,  
lymfoedeem of postoperatieve complicaties.

Het product wordt vervaardigd met nylon en lycra; er wordt géén latex gebruikt.  
U vindt meer productinformatie op de website.

## INDICATIES

Milde tot gemiddelde zwelling van de voet, veroorzaakt door veneuze,  
lymatische en andere aandoeningen.

## VOORZORGEN

Raadgeef professioneel medisch advies, als u één van de onderstaande aan-  
doeningen heeft of recent heeft ontwikkeld:

- Huidaandoeningen c.q. natte eczeem
- Milde arteriële aandoeningen
- Contactallergie of allergievervalsingen t.g.v. nylon of lycra
- Verminderd gevoel in voet of tenen (perifere neuropathie)
- Gecontroleerd CHF (congestief hartfalen)
- Kuitomtrek > 23 cm.

## CONTRA-INDICATIES

FarrowWrap™ is gecontra-indiceerd (mag **NIE**T ingezet worden) als u lijdt aan  
een van de volgende arteriële aandoeningen, met name waarbij sprake is van  
(recent) verminderde gevoeligheid van voeten en/of tenen

- Onbehandelde vaatinfectie
- Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief hartfalen (CHF)
- Onbehandelde of gevorderde ontstekingen die betrekking hebben op de  
benen of voeten
- Zwelling van het been met een onbekende oorzaak

## AANTREKINSTRUCTIE

- Open wonden dienen afgedekt te worden voor het aanbrengen  
van het onderbeenverband.
- Gebruik een liner (onderkous). Wij bevelen altijd het gebruik  
van een liner (onderkous) onder uw FarrowWrap™ aan.

- Pak het onderbeenverband uit en leg het op bed of op een stoel,

- met het label aan de bovenzijde naar u toe gericht.
- Pak de band welke het dichtst bij het smalste deel van uw enkel  
zit, met één hand aan elke zijde van de enkel.

- Wind de band zo strak mogelijk om het laagste deel van uw

- been, ruim boven de enkelknobbel.
- Bevestig de overgebleven banden op dezelfde manier.
- Trek de liner terug over het bovenste deel van het onderbeen-  
verband.

Om een instructievideo te bekijken, bezoek [www.farrowwrap.nl](http://www.farrowwrap.nl).



## VERZORGING

Machinewas 30°



- Gebruik een fijnwasmiddel

Niet bleken



- Voorzichtig met scherpe vingernagels

Liggend laten drogen



- Vervang de FarrowWrap™ na 3 maanden,

Niet strijken



indien nodig eerder.

Niet stomen



- Bewaar op een droge plaats.

## GARANTIE

Er geldt een reparatie/vervangingsgarantie van 15 dagen voor het product.

**Let op:** eigenhandige veranderingen/modificaties aan het product leiden tot het  
vervallen van deze garantiebepaling.