

# VARODEM<sup>®</sup>

*FARROWWRAP<sup>™</sup>*

Gedistribueerd in Nederland door:

**Varodem S.A.**  
Rue d'Arlon 45  
B-6747 Saint-Léger  
België

**Servicekantoor Nederland**  
Postbus 4717  
6085 ZG Horn  
Nederland

+31-(0)475-589302  
info@farrowwrap.nl

[www.farrowwrap.nl](http://www.farrowwrap.nl)  
[www.varodem.nl](http://www.varodem.nl)

FarrowWrap is een handelsmerk van Farrow Medical Innovations Inc  
2009 Farrow Medical Innovations Inc. TX77803 USA



# VARODEM<sup>®</sup>

*FARROWWRAP<sup>™</sup>*



**FarrowWrap<sup>™</sup> Classic**  
**Compressieverband**

Patent Pending

**Let op:** eigenhandige veranderingen/modificaties aan het product leiden tot het vervallen van deze garantiebepaling.  
Er geldt een reparatie/vervangingsgarantie van 15 dagen voor het product.

#### GARANTIE

- Gebruik een fijnwasmiddel
- Voorzichtig met scherpe vingernagels
- Vervang de FarrowWrap™ na 3 maanden, indien nodig eerder.
- Bewaar op een droge plaats.

#### VERZORGING

Machinewas 30°		Niet stomen	
Niet bleken		Niet strijken	
Wasdroger koud			

Om een instructievideo te bekijken, bezoek [www.farrowwrap.nl](http://www.farrowwrap.nl).

#### AANTREKINSTRUCTIE

- Open wonden dienen afgedekt te worden voor het aanbrengen van het voetverband.
- Gebruik een liner (onderkous). Wij bevelen altijd het gebruik van een liner (onderkous) onder uw FarrowWrap™ aan.
- Zorg voor een goede overlap bij het wikkeken. Tracht om de lagen halverwege van elkaar te laten verlopen.

#### TOEPASSING

Het FarrowWrap™ Classic verband is een korte-rek verband bedoeld voor algemeen gebruik.

Het compressieverband is ontworpen om in combinatie gebruikt te worden met alle andere Farrow producten, zoals bijvoorbeeld de FarrowWrap™ liner (onderkous).

Het FarrowWrap™ compressieverband ondersteunt de behandeling van aan- doeningen die zwelling van de arm, het been, de voet of de hand veroorzaken, zoals veneuze insufficiëntie, lymfoedeem of postoperatieve complicaties.

Het product wordt vervaardigd met nylon en lycra; er wordt géén latex gebruikt. U vindt meer productinformatie op de website.

#### INDICATIES

Gemiddelde tot ernstige zwelling van de arm, been, voet of hand veroorzaakt door veneuze, lymfatische en andere aandoeningen.

#### VOORZORGEN

Raadpleeg professioneel medisch advies, als u één van de onderstaande aan- doeningen heeft of recent heeft ontwikkeld:

- Huidaandoeningen c.q. natte eczeem
- Milde arteriële aandoeningen
- Contactallergie of allergievervalsing t.g.v. nylon of lycra
- Verminderd gevoel in voet of tenen (perifere neuropathie)
- Gecontroleerd CHF (congestief hartfalen)
- Pijnlijke Hallux Valgus (bij gebruik rond de voet)

#### CONTRA-INDICATIES

FarrowWrap™ is gecontra-indiceerd (mag **NIE**t ingezet worden) als u lijdt aan een van de volgende aandoeningen:

- Matige tot ernstige arteriële aandoeningen, met name waarbij sprake is van (recent) verminderde gevoeligheid van voeten en/of tenen
- Onbehandelde vaatinfectie
- Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief hartfalen (CHF)
- Onbehandelde of gevorderde huidaandoeningen (cellulitis) betrekking hebbend op benen, voeten, armen of handen
- Zwelling van de voet, arm of hand met een onbekende oorzaak