

VARODEM[®]

FARROWWRAP[™]

Gedistribueerd in Nederland door:

Varodem S.A.
Rue d'Arlon 45
B-6747 Saint-Léger
België

Servicekantoor Nederland
Postbus 4717
6085 ZG Horn
Nederland

+31-(0)475-589302
info@farrowwrap.nl


www.farrowwrap.nl
www.varodem.nl

FarrowWrap is een handelsmerk van Farrow Medical Innovations Inc
2009 Farrow Medical Innovations Inc. TX77803 USA



VARODEM[®]

FARROWWRAP[™]

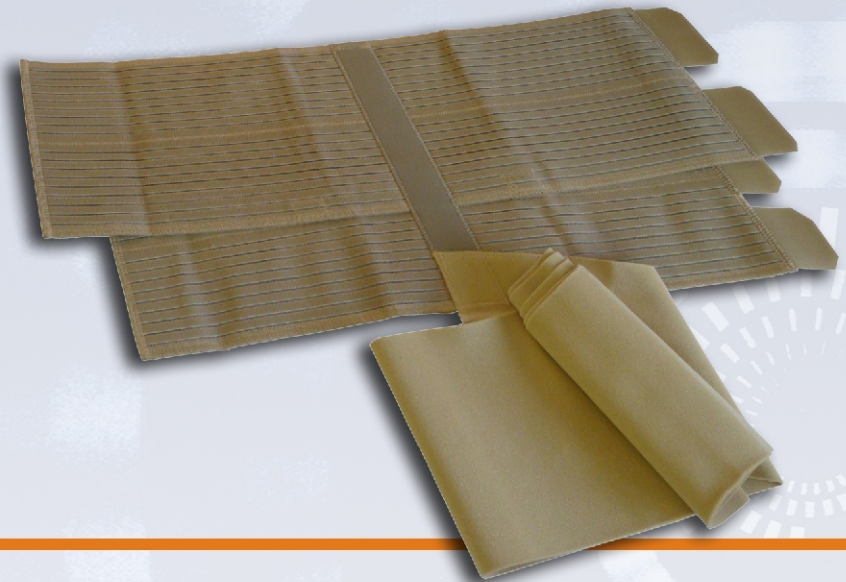

FarrowWrap[™] Classic
Bovenbeenverband

Patent Pending

Maat XS S M L XL
Lengte Kort Nor. Lang Maatwerk
Lot #:

Let op: eigenhandige veranderingen/modificaties aan het product leiden tot het vervallen van deze garantie/bepaling.

Er geldt een reparatie/vervangingsgarantie van 15 dagen voor het product.

GARANTIE

<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een fijnwasmiddel • Voorzichtig met scherpe vingernagels • Vervang de FarrowWrap™ na 3 maanden, indien nodig eerder. • Bewaar op een droge plaats. 	<ul style="list-style-type: none"> • Niet stomen • Niet strijken • Liggend laten drogen • Niet bleken • Machinewas 30° 	<ul style="list-style-type: none">
---	---	--

VERZORGING

Om een instructievideo te bekijken, bezoek www.farrowwrap.nl.



- Als u het bovenbeenverband verwijderd, rol dan het klossenband over zichzelf uit, zodat het niet aan elkaar blijft klossen.



- Pak vervolgens het nog ingepakte knieverband en wikkel deze in per keer ongeveer de helft van de stof, of zoveel mogelijk, overlapt. Trek de liner (onderkous) terug over het bovenste deel van het bovenbeenverband



- Herhaal deze stap met de bovenliggende banden.
- Pak vervolgens het nog ingepakte knieverband en wikkel deze in per keer ongeveer de helft van de stof, of zoveel mogelijk, overlapt. Trek de liner (onderkous) terug over het bovenste deel van het bovenbeenverband



- Bevestig de onderste band van het bovenbeenverband zo strak mogelijk om het onderste deel (het boven knie) van het dijbeen. van het beenverband om het op zijn plaats te houden.
- Pak het nog opgerolde knieverband en stop het in de bovenrand deel onder uw dijbeen, om het op de plaats te houden.
- Pak het bovenbeenverband uit. Plaats, al zittend, het bovenste gebruik van een liner (onderkous) onder uw FarrowWrap™ aan.
- Gebruik een dijbeen liner (onderkous). Wij bevelen altijd het van het bovenbeenverband.
- Open wonden dienen afgedekt te worden voor het aanbrengen

AANTREKINSTRUCTIE

TOEPASSING
Het FarrowWrap™ Classic bovenbeenverband is een korte-rek verband bedoeld voor het dijbeen en de knie.

Het bovenbeenverband is ontworpen om in combinatie gebruikt te worden met andere Farrow producten, zoals bijvoorbeeld het FarrowWrap™ voet- en onderbeenverband. Het standaard knieverband is voor uw gemak gebruikersspecifiek aan te passen aan het beenverband.

Het FarrowWrap™ Classic bovenbeenverband ondersteunt de behandeling van aan- en doeningen die zwelling van het dijbeen veroorzaken, zoals veneuze insufficiëntie, mild lymfoedeem of postoperatieve complicaties.

Het product wordt vervaardigd met nylon en lycra; er wordt géén latex gebruikt. U vindt meer productinformatie op de website.

INDICATIES

Gemiddelde tot ernstige zwelling van het dijbeen, veroorzaakt door veneuze, lymfatische en andere aandoeningen.

VOORZORGEN

Raadpleeg professioneel medisch advies, als u één van de onderstaande aandoeningen heeft of recent heeft ontwikkeld:

- Huidaandoeningen c.q. natend eczeem
- Milde arteriële aandoeningen
- Contactallergie of allergievervalsing m.b.t. nylon of lycra
- Verminderd gevoel in voet of tenen (perifere neuropathie)
- Geschiedenis van trombose in de benen
- Gecontroleerd CHF (congestief hartfalen)

CONTRA-INDICATIES

- FarrowWrap™ is gecontra-indiceerd (mag **NIE**t ingezet worden) als u lijdt aan een van de volgende aandoeningen:
- Matige tot ernstige arteriële aandoeningen, met name waarbij sprake is van (recent) verminderde gevoeligheid van voeten en/of tenen
- Onbehandelde vaatinfectie
- Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief hartfalen (CHF)
- Onbehandelde of gevorderde huidaan- en/of tenen (cellulitis) betrekking hebbend op benen of voeten