

VARODEM®

FARROWWRAP™

Gedistribueerd in Nederland door:

Varodem S.A.
Rue d'Arlon 45
B-6747 Saint-Léger
België

Servicekantoor Nederland
Postbus 4717
6085 ZG Horn
Nederland

+31-(0)475-589302
info@farrowwrap.nl

www.farrowwrap.nl
www.varodem.nl

FarrowWrap is een handelsmerk van Farrow Medical Innovations Inc
2009 Farrow Medical Innovations Inc. TX77803 USA



VARODEM®

FARROWWRAP™



FarrowWrap™ LITE
Bovenbeenverband

Patent Pending

Maat	<input type="checkbox"/> XS	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XL
Lengte	<input type="checkbox"/> Kort	<input type="checkbox"/> Nor.	<input type="checkbox"/> Lang	<input type="checkbox"/> Maatwerk	
Kleur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Huid		Lot #:	

Let op: eigenhandige veranderingen/modificaties aan het product leiden tot het vervallen van deze garantie/bepaling.

Er geldt een reparatie/vervangingsgarantie van 15 dagen voor het product.

GARANTIE

• Gebruik een fijnwasmiddel	Niet bleken	
• Voorzichtig met scherpe vingernagels	Niet strijken	
• Vervang de FarrowWrap™ na 3 maanden,	Wasdroger koud	
indien nodig eerder.	Niet stomen	
• Bewaar op een droge plaats.		

VERZORGING

Om een instructievideo te bekijken, bezoek www.farrowwrap.nl.



• Als u het bovenbeenverband verwijderd, rol dan het klossenband over zichzelf uit, zodat het niet aan elkaar blijft klossen.



• Pak vervolgens het nog ingepakte knieverband en wikkel deze in een draaiende beweging zo strak mogelijk rond de knie, waarbij u per keer ongeveer de helft van de stof, of zoveel mogelijk, overlapt. Trek de liner (onderkous) terug over het bovenste deel van het bovenbeenverband



• Bevestig de onderste band van het bovenbeenverband zo strak mogelijk om het onderste deel (het boven knie) van het dijbeen. van het beenverband om het op zijn plaats te houden.



• Pak het bovenbeenverband uit. Plaats, al zittend, het bovenste deel onder uw dijbeen, om het op de plaats te houden. Gebruik van een liner (onderkous) onder uw FarrowWrap™ aan. Gebruik een dijbeen liner (onderkous). Wij bevelen altijd het van het bovenbeenverband.

AANTREKINSTRUCTIE

Het FarrowWrap™ LITE bovenbeenverband is een korte-rek verband bedoeld voor het dijbeen en de knie.

Het bovenbeenverband is ontworpen om in combinatie gebruikt te worden met andere Farrow producten, zoals bijvoorbeeld het FarrowWrap™ voet- en onderbeenverband. Het standaard knieverband is voor uw gemak gebruikersspecifiek aan te passen aan het beenverband.

Het FarrowWrap™ LITE bovenbeenverband ondersteunt de behandeling van aan- en doeningen die zwelling van het dijbeen veroorzaken, zoals veneuze insufficiëntie, mild lymfoedeem of postoperatieve complicaties.

Het product wordt vervaardigd met nylon en lycra; er wordt géén latex gebruikt. U vindt meer productinformatie op de website.

INDICATIES

Milde tot gemiddelde zwelling van het dijbeen, veroorzaakt door veneuze, lymfatische en andere aandoeningen.

VOORZORGEN

Raadpleeg professioneel medisch advies, als u één van de onderstaande aandoeningen heeft of recent heeft ontwikkeld:

- Huidaandoeningen c.q. natend eczeem
- Milde arteriële aandoeningen
- Contactallergie of allergieverschijnselen m.b.t. nylon of lycra
- Verminderd gevoel in voet of tenen (perifere neuropathie)
- Geschiedenis van trombose in de benen
- Gecontroleerd CHF (congestief hartfalen)

CONTRA-INDICATIES

- FarrowWrap™ is gecontra-indiceerd (mag **NIE**t ingezet worden) als u lijdt aan een van de volgende aandoeningen:
- Matige tot ernstige arteriële aandoeningen, met name waarbij sprake is van (recent) verminderde gevoeligheid van voeten en/of tenen
- Onbehandelde vaatinfectie
- Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief hartfalen (CHF)
- Onbehandelde of gevorderde huidaandoeningen (cellulitis) betrekking hebbend op benen of voeten

TOEPASSING