

VARODEM®

FARROWWRAP™

Gedistribueerd in Nederland door:

Varodem S.A.
Rue d'Arlon 45
B-6747 Saint-Léger
België

Servicekantoor Nederland
Postbus 4717
6085 ZG Horn
Nederland

+31-(0)475-589302
info@farrowwrap.nl

www.farrowwrap.nl
www.varodem.nl

FarrowWrap is een handelsmerk van Farrow Medical Innovations Inc
2009 Farrow Medical Innovations Inc. TX77803 USA



VARODEM®

FARROWWRAP™



FarrowHybrid™
therapeutisch buisverband

Patent Pending

Maat

S

M

L

Lot #:

VOORDELEN
 FarrowHybrid™ is een buisverband met een gepatenteerde "hybride" technologie, wat inhoudt dat het verband voor 50% de eigenschappen van een therapeutische elastische kous bezit en voor 50% die van een beschermende onderkous/buisverband.

Deze technologie draagt vele voordelen in zich, zoals:
 • het verband is makkelijk aan- en uit te trekken
 • het past makkelijk in schoeisel
 • het verband biedt 15 - 20 mmHg druk op de middenvoet bij een omvang van 20 - 25 cm. en 20 - 30 mmHg druk bij een omvang van 25 - 30 cm.*
 • speciaal ontworpen om perfect gecombineerd te worden met de FarrowWrap™ korte-rek producten voor maximale flexibiliteit en prestaties
 FarrowHybrid™ ondersteunt oedemateuse aandoening die de voet betreffen, zoals veneuze insufficiëntie of mild lymfoedeem.
 FarrowHybrid™ kan uitstekend alleen ingezet worden, maar is specifiek ontworpen om in combinatie met het FarrowWrap™ beenverband te gebruiken, om zo zwelling van de voet en het been te bestrijden.

VOORZORGEN

Raadpleeg professioneel medisch advies, als u één van de onderstaande aandoeningen heeft of recent heeft ontwikkeld:
 • Huidaandoeningen c.q. natte eczeem
 • Milde arteriële aandoeningen
 • Contactallergie of allergievervalschijnselen t.g.v. nylon of lycra
 • Verminderd gevoel in voet of tenen (perifere neuropathie)
 • Gecontroleerd CHF (congestief hartfalen)
 • Ernstige Hallux Valgus.

CONTRA-INDICATIES

FarrowWrap™ is gecontra-indiceerd (mag **NIET** ingezet worden) als u lijdt aan een van de volgende aandoeningen:
 • Matige tot ernstige arteriële aandoeningen, met name waarbij sprake is van (recent) verminderde gevoeligheid van voeten en/of tenen
 • Onbehandelde vaatinfectie
 • Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief hartfalen (CHF)
 • Onbehandelde of gevorderde ontstekingen die betrekking hebben op de benen of voeten
 • Zwelling van het been met een onbekende oorzaak

* niet gebruiken bij middenvoetomtrek > 30 cm.

AANTREKINSTRUCTIE



- Open wonden dienen afgedekt te worden voor het aanbrengen van het buisverband.
- Zorg ervoor dat de hiel goed uitgelijnd is t.o.v. de voet van het buisverband.
- Trek de FarrowHybrid™ over de tenen en langzaam omhoog over het been.
- Blijf trekken, totdat de FarrowHybrid™ helemaal aan is.
- Trek iets aan het uiteinde van de teenzijde van de FarrowHybrid™, zodat er ruimte ontstaat voor de tenen om te bewegen.
- Zorg ervoor dat de FarrowHybrid™ goed is van maat en prettig zit. De hiel moet netjes in het hielstuk passen en de tenen moeten geen of zeer weinig druk ervaren van het FarrowHybrid™ buisverband.
- Wrijf mogelijke plooien glad.

Om een instructievideo te bekijken, bezoek www.farrowwrap.nl.

VERZORGING

Machinewas 30°		• Gebruik een fijnwasmiddel
Niet bleken		• Voorzichtig met scherpe vingernagels
Droger, lage temperatuur		• Vervang de FarrowWrap™ na 3 maanden,
Niet strijken		indien nodig eerder.
Niet stomen		• Bewaar op een droge plaats.

GARANTIE

Er geldt een reparatie/vervangingsgarantie van 15 dagen voor het product. **Let op:** eigenhandige veranderingen/modificaties aan het product leiden tot het vervallen van deze garantiebepaling.