

VARODEM[®]

Microfine

lymfoedeem

TEENVERBAND



Verbandhulpmiddel

ruimte voor sticker

Absolute Contraindicaties

- Gevorderd perifeer vaatlijden
- Gedecompenseerde hartklachten
- Ongecontroleerd congestief hartfalen
- Onbehandeld septisch flebitis

Relatieve Contraindicaties

- Huidontstekingen
- Vochtig eczeem
- Contactallergie t.g.v. materiaal
- Verminderde gevoeligheid ledemaat
- Perifere neuropathie
- Open wonden

MAATTABEL

Meetpunt	X-Small	Small	Medium	Large
omtrek v.d. bal van de voet	21-23 cm.	23-25 cm.	25-27 cm.	27-29 cm.

VOORDELEN

Links en rechts bruikbaar

Op maat te knippen. De tenen kunnen op lengte geknipt worden zonder afbreuk te doen aan de compressie of dat het product rafelt

Constant gebruiksgemak. Fijne naden met comfortabele stukken tussen de tenen, gecombineerd met ultra dun en zacht microfine materiaal

Latex vrij. 52% polyamide en 48% elastine

ONDERHOUD



Niet strijken

Niet machinedrogen

Niet stomen

Niet bleken



Vermijd hitte bij opslag

Niet in de felle zon opslaan

Knijp overtollig water uit en droog verwijderd van hitte

Informatie

Varodem S.A. (servicekantoor Nederland)
Postbus 4717
6085 ZG Horn
Nederland

Verpakking bevat één Microfine Teenkap

